

Mirage Activa™ LT

MASQUE NARINAIRE

Guide de mise en place



- Réglez la molette de réglage de MicroFit sur la position 24, pour élargir au maximum le support frontal.



- Défaites le clip d'attache inférieur du harnais, posez le masque sur le nez et faites passer le harnais par dessus la tête.
- Remettez le clip d'attache inférieur du harnais en place en veillant à ce qu'il s'emboîte correctement.



- Laissez les sangles inférieures un peu lâches pour conserver de l'espace pour le gonflement de la bulle. Utilisez deux doigts pour vérifier la tension des sangles.




- Raccordez une extrémité du circuit respiratoire à la pièce pivotante et l'autre extrémité à l'appareil.




- Démarrez l'appareil.



- Tout en étant allongé, réglez votre niveau de confort et l'étanchéité en tournant la molette de réglage.

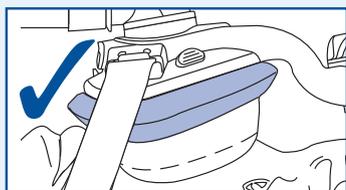

- Si le masque est correctement mis en place, la bulle doit être confortable et sans plis.

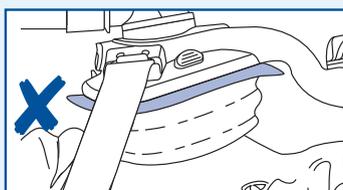

- Si le masque est mal mis en place, la bulle sera mal gonflée et froissée.

⚠ Pour plus de renseignements, veuillez consulter le guide utilisateur du masque nasal Mirage Activa LT.